

# Stimulatie- en druksonde vaginaal

**gymna**

Art: 577825



## Productinformatie

- vaginale stimulatie- en druksonde met 2 mm aansluiting, wit.
- 2 ringvormige stimulatiezones.
- ballonvormige drukzone voor pressofeedback
- met verbredingsstuk aan het uiteinde om de sonde makkelijk op de juiste diepte in te brengen.
- geschikt voor elektrostimulatie en pressofeedback.
- compatibel met Evostim P en Gymna Myo 200.
- art. 320.837 - adapter voor druksondes - is noodzakelijk bij gebruik op Gymna Myo 200.

Hoe sondes reinigen? Gezien het persoonlijke en intieme karakter van incontinentiesondes is het aanbevolen dat iedere patiënt zijn eigen sonde aankoopt. Reinig de sonde na elk gebruik met zeepwater en verwijder de slijmen met een kleine borstel. Afspoelen met zuiver water en zorgvuldig afdrogen. Indien nodig: desinfecteer UITSLUITEND met een bacterie- en virusremmende koude oplossing. Stop de sonde terug in de verpakking.