


# Respirogram respiratie trainer

**gymna**

Art: 9011003 | Merk: [MEDINET](#)

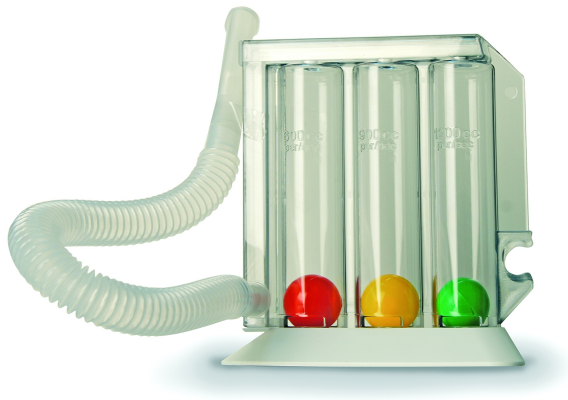

## Productinformatie

**VOOR INDIVIDUEEL GEBRUIK RESPIPROGRAM** is een **ademhalingstrainer** speciaal ontworpen om de **diepe inspiratie aan te moedigen**.

- Diep ademen helpt enerzijds om **de alveoli van de longen te doen uitzetten**.
- Anderzijds om **de mucus te verwijderen uit de luchtwegen**.

### INDICATIES VOOR RESPIPROGRAM

- Preventie van postoperatieve complicaties zoals atelectase, pneumonie of pulmonaire dysfunctie.

### HOE RESPIPROGRAM GEBRUIKEN?

- Laat uw patiënt - na expiratie - diep inademen zodat hij twee of drie balletjes omhoog krijgt.
  - Zo lang als mogelijk inademen.
- Mondstuk uitnemen en traag uitademen door de neus.
- Ontspannen na iedere diepe inspiratie.
- Proces herhalen (zo vaak u hem dat aangeeft).

### PRODUCT SPECIFICATIES

- De maten op de cilinders dienen enkel als indicatie.
- Een filter verzekert dat er geen gevaarlijke stofdeeltjes ingeademd worden.
- Kan volledig uit elkaar gehaald worden om te reinigen.
  - reinigen met warm water (40°).
  - vervolgens laten drogen.

### VERPAKKING

- RESPIPROGRAM wordt geleverd met een connector met filter, en een tube met mondstuk.

**OPGELET RESPIPROGRAM is géén toestel om de luchtstroom te meten! RESPIPROGRAM is enkel geschikt voor individueel gebruik.** Combineerbaar met de RESPILIFT expiratie-trainer (art. 9011004).

Op deze manier is aaneensluitend in- en uitademen tegen weerstand mogelijk.