

# Respivol inspiratie trainer kinderen - 2500 cc

**gymna**

Art: 9011002 | Merk: [MEDINET](#)



## Productinformatie

RESPIVOL is een medisch hulpmiddel om diepe en langdurige inspiratie te stimuleren.

- Geschikt voor patiënten die lijden aan restrictieve en/of obstructieve respiratoire aandoeningen.

### INDICATIES VOOR RESPIVOL

- Preventie van postoperatieve complicaties.
- Patiënten waarbij respiratoire spiertraining voorgeschreven is omwille van malfunctie van de ademhalingspijpen door ziekte.
- preventie van verhoogde vatbaarheid voor respiratoire insufficiëntie zoals bij COPD.

### HOE RESPIVOL GEBRUIKEN?

- U laat uw patiënt traag inademen tot de linkse floter zich tussen de markeringen bevindt.
  - Hij houdt dit zo lang mogelijk vol.
- Vervolgens begint de rechtse floter te stijgen.
  - Laat uw patiënt proberen om de rechtste markering - die u als therapeut heeft ingesteld - te bereiken.
  - De onderste markering dient om het werkelijk bereikte volume aan te duiden.
- Mondstuk uitnemen en traag uitademen door de neus.
- Ontspannen na iedere diepe inspiratie.
- Proces herhalen (zo vaak u hem dat aangeeft).
- Na de oefening hoesten om de slijmen te verwijderen.

### WAAROM OEFENEN MET RESPIVOL?

- Feedback ingeademde luchtvolume.
- Laat evaluatie van progressie toe voor - en na operatie.

- Werkt sterk motiverend.

#### PRODUCT SPECIFICATIES

- 2.500 cc voor kinderen (5.000 cc voor volwassene - art.9011001).
- Uitgerust met markeringen.
- Een filter verzekert dat er geen gevaarlijke stofdeeltjes ingeademd worden.
- Kan volledig uit elkaar gehaald worden om te reinigen.
  - reinigen met warm water (40°).
  - vervolgens laten drogen.

#### VERPAKKING

- RESPIVOL wordt geleverd met een connector met filter, en een tube met mondstuk.

VOOR INDIVIDUEEL GEBRUIK OPGELET RESPIVOL is géén toestel om het longvolume te meten!

Combineerbaar met de RESPILIFT expiratie-trainer (art. 9011004). Op deze manier is aaneensluitend in- en uitademen tegen weerstand mogelijk.