

# Blackroll Compression Boots - small

**gymna**

Art: 577070 | Merk: [BLACKROLL](#)



## Productinformatie

**Compressie voor de benen na een zware training of werkdag.**

De **BLACKROLL COMPRESSION BOOTS** bevorderen de bloedsomloop en helpen om **pijn en zwelling te verminderen, spieren te ontspannen**, en zware benen te verlichten. De zachte druk en masserende werking van de compressielaarzen zorgen voor ontspanning en het verminderen van stress.

**Ideaal voor uw patiënten thuis!**

De Blackroll Compression Boots zijn bedoeld voor RECOVERY, het zijn GEEN therapie-hulpmiddelen.

### SNELLER HERSTEL, BETERE MOBILITEIT

- Bij de productie van energie worden metabolische afvalstoffen - zoals lactaat - geproduceerd in het lichaam. Deze moeten worden **afgevoerd via het bloed en het lymfestelsel**. Tijdens een compressiemassage worden ze uit de spieren gespoeld waardoor het **herstelproces versnelt**.
- De compressie bevordert de bloedcirculatie in voeten en benen en **verbetert de mobiliteit** direct na gebruik.

### OVERAL TE GEBRUIKEN

- Dankzij het compacte en lichte ontwerp met interne buizen zijn de compression boots overal te gebruiken.
- De compressielaarzen zijn makkelijk mee te nemen in hun praktische opbergtas.

### DE VOORDELEN VAN COMPRESSION BOOTS OP EEN RIJTJE

- Verminderen van spierspanning en bevorderen van bloedcirculatie
- Minder spierpijn en snellere regeneratie
- Ondersteuning van lymfestroom
- Compact ontwerp dankzij interne slangen en geïntegreerde compressor
- Compressiecyclus van 60 seconden
- 3 programma's\* met 5 drukniveaus (40- 120 mmHg)
- Continue massage dankzij de 5 overlappende luchtkamers

*\*zie bijlage: vullen van de luchtkamers*

## **VIND DE JUISTE MAAT**

- Voor de beste pasvorm van de compressie boots raden wij aan om de binnenlengte van de benen te meten.
- Ga rechtop tegen een muur staan en klem een voorwerp (bijvoorbeeld een boek) tussen de benen.
- Meet nu de lengte van de vloer tot de bovenrand van het voorwerp en kies dan de juiste maat :
  - binnenbeenlengte < 81 cm = maat S (840 x 330 x 120 mm, dijontrek = tot 65 cm)
  - binnenbeenlengte 81-88 cm = maat M (940 x 380 x 140 mm, dijontrek = tot 75 cm)
  - binnenbeenlengte > 88 cm = maat L (1020 x 380 x 150 mm, dijontrek = tot 75 cm)

## **HOE TE GEBRUIKEN?**

- In het algemeen gebruikt men de compressie boots het beste liggend of zittend.
- Idealiter liggen de voeten niet lager dan het bekken, zodat de boots niet tegen de zwaartekracht in hoeven te werken.

## **TECHNISCHE SPECIFICATIES**

- Batterij: oplaadbare en verwijderbare 1.000mAh lithium-ion batterij
- Opladen: USB-C oplaadaansluiting
- Oplaadtijd batterij: 1,5 uur
- Druk: 40-120 mmHg
- Stand-by: werkt ca. 60 min (bij gemiddeld drukniveau)
- Geluidsniveau: ≤ 55 dB
- CE gecertificeerd

*Inhoud van de doos: 2 x COMPRESSIE BOOT - 2 x batterij - 1 x opbergtas - 1 x USB-C oplaadkabel met dubbele connector - 1 x handleiding.*